

InSight™ Canine Parvovirus Ag Rapid Test

IVD

1. POUŽITÍ

InSight™ Canine Parvovirus Ag Rapid Test pro rychlou kvalitativní imunochromatografickou detekci psího parvoviru (CPV Ag) v psí stolici nebo vomitu.

Doba testu: 5-10 minut

Vzorek: stolice nebo vomit


2. PRINCIP TESTU

InSight™ Canine Parvovirus Ag Rapid Test je založen na imunochromatografické technice. Testační kazeta má jedno testovací okénko a obsahuje zónu T (test) a zónu C (control). Je-li v psí stolici nebo vomitu přítomen CPV antigen, váže se v testovací T zóně. Důkazem správné funkce testu je tvorba proužku v kontrolní C zóně.

3. OBSAH SOUPRAVY

Testační kazeta, pipetka, test pufr (1 ml), sěrka, sušidlo, návod.

4. POSTUP STANOVENÍ

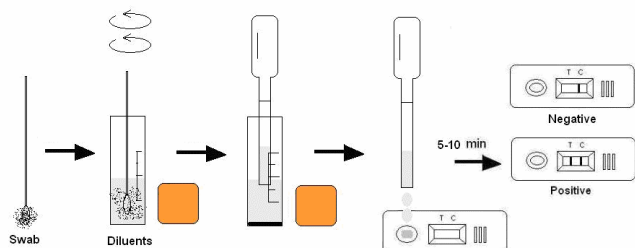


- test provádějte při pokojové teplotě.
- příprava vzorku: naberte sěrku tenkou vrstvou stolice nebo vomitu.
- sěrku se vzorkem vložte do tuby s pufrům a krátce zamíchejte (5 sec).
- vyjměte kazetu z fólie a položte ji vodorovně na stůl.
- do vzorkové jamky "S" dāvkujte 3 kapky suspenze.
- vyhodnocení testu v intervalu od 5 do 10 minut po startu.
- výsledek odečtený až po 10 min. je považován za neplatný.

5. VYHODNOCENÍ TESTU

Positivní výsledek: proužek v zóně T a zóně C.

Negativní výsledek: proužek pouze v zóně C.

Neplatný výsledek: obě zóny bez proužku nebo je jen v zóně T

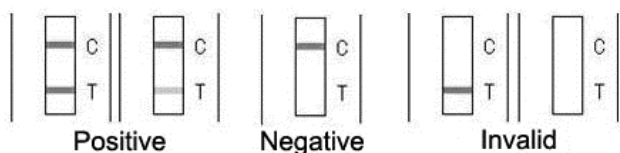

6. SKLADOVÁNÍ

Testační soupravu skladujte v rozsahu teplot od 2°C do 30°C. Souprava je stabilní do data expirace uvedeném na obalu. NEZMRAZUJTE. Neskladujte na přímém slunečním světle.

7. DŮLEŽITÉ POKYNY

Nejllepší výsledků dosáhnete striktním dodržením pokynů.

- Všechny složky testační soupravy musí být před začátkem testu vytemperovány na pokojovou teplotu.
- Nevyjímejte testační kazetu z obalu až těsně před použitím.
- Nepoužívejte opakovaně testační soupravu.
- Nepoužívejte proexpirovanou soupravu, datum expirace je uvedeno na obalu kazety.
- Součásti této sady prošly kontrolou kvality.
- Nemíchejte mezi sebou složky testačních souprav z jiným číslem výrobní šarže.

8. OMEZENÍ

InSight™ Canine Parvovirus Ag Rapid Test je určen pouze pro in vitro veterinární diagnostiku. Všechny výsledky by měly být porovnávány s dalšími klinickými informacemi. Je-li vyžadováno další potvrzení výsledků testu, použijte alternativní metody detekce např. PCR.

Výrobce:

Woodley Veterinary Diagnostics
St. John's Street Horwich, Bolton Lancashire, U.K.

Váš dodavatel:

Maneko, spol. s r.o.
Na Pískách 71, 160 00 Praha 6
tel.: 233 335 638-9, fax: 233 332 656
maneko@maneko.cz
www.maneko.cz